

Bočica za raspršivanje lijekova protiv bolova u predjelu krajnika

Upute za upotrebu

Upotreba isključivo na recept. Prodaja uređaja saveznim je zakonom dopuštena isključivo liječnicima i drugim osobama ovlaštenim za obavljanje liječničke prakse ili na njihov nalog.

NAMJENA: Uređaj je posebno namijenjen za upotrebu s medicinskim supstancama za liječenje bolesti grla. Lijek morate uzimati u dozi i vremenskom razmaku propisanom od strane vašeg liječnika. Češća upotreba ili upotreba u dozi iznad preporučene može imati štetne posljedice.

1. Skinite prozirni čep.
2. Ispružite nastavak za raspršivanje i držite ga okrenutog prema sebi (NAPOMENA: za pravilnu primjenu nastavak mora biti pod pravim kutom).
3. Bočicu kažiprstom čvrsto držite za glavu za raspršivanje.
4. Usmjerite nastavak prema željenom području, držeći vrh raspršivača što bliže željenom području ali bez da vam to izaziva nelagodu, te pokušajte držati jezik prema dolje.
5. Čvrsto pritisnite mehanički raspršivač kako biste raspršili sprej – NEMOJTE UDISATI TIJEKOM RASPRŠIVANJA!


UPOTREBA ZA JEDNOG PACIJENTA

Rx Only Samo na recept


LOT Šifra šarže


REF Kataloški broj

 Oprez


 Ne upotrebljavajte ako je ambalaža oštećena

 Nesterilno

 Upute za upotrebu elektroničke
eIFU Indicator

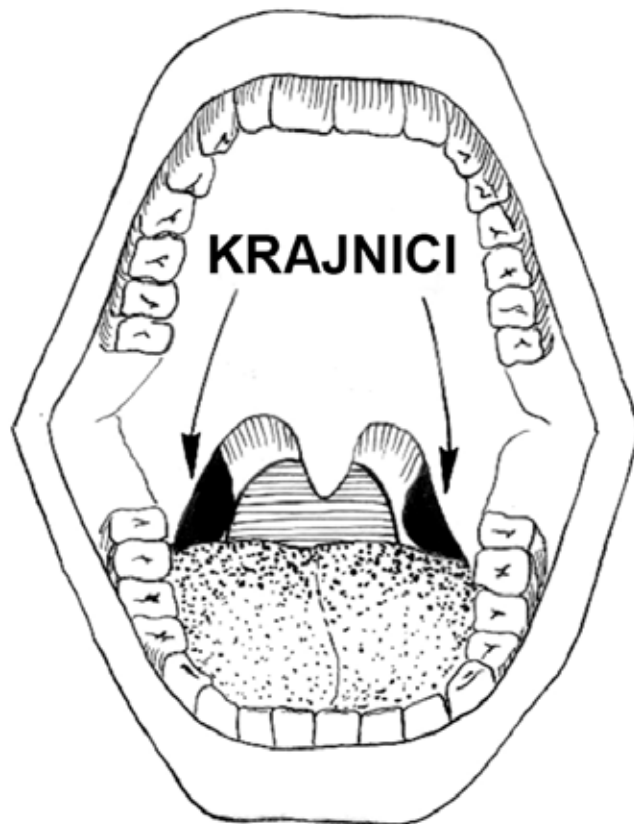

CE

 **BrilliENT, LLC**
888 E Belvidere Road, Suite 212
Grayslake, IL 60030 USA

EC|REP **mdi Europa GmbH**
Langenhagener Straße 71
D-30855 Langenhagen, Germany

 **OPREZ: Zabranjena upotreba djeci mlađoj od 10 godina.**

BR-LS-0001(Rev 1)2017-9_hr_HR