

Spray anestésico para as amígdalas

Instruções de utilização

Sujeito a receita médica. O direito regulador limita a venda do dispositivo a ou por prescrição de médicos ou outros profissionais médicos autorizados.

FINALIDADE: Este dispositivo destina-se especificamente à administração de substâncias medicamentosas para tratar doenças de garganta. Esta medicação deverá apenas ser utilizada na dosagem e pelo período de tempo indicados pelo seu médico. Uma utilização mais frequente ou dosagens superiores ao recomendado podem ter efeitos nocivos como consequência.

1. Retire a tampa transparente.
2. Estenda a cânula de pulverização e segure na sua direção (NOTA: a cânula deve estar em ângulo reto para uma utilização adequada).
3. Segure o frasco firmemente com o dedo indicador na cabeça de pulverização.
4. Aponte a cânula diretamente para a área pretendida, aproximando a ponta do pulverizador o máximo possível na medida do confortável, e tente manter a língua em baixo.
5. Pressione firmemente o êmbolo para pulverizar – NÃO INALE ENQUANTO PULVERIZA!

PARA UTILIZAÇÃO NUM ÚNICO PACIENTE


Rx Only Sujeito a prescrição médica

LOT Código de lote

REF Número de catálogo



Cuidado

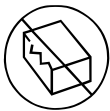


Não utilizar se a embalagem estiver danificada



Não esterilizado



Instruções em formato eletrónico para utilização do **eIFU Indicator**

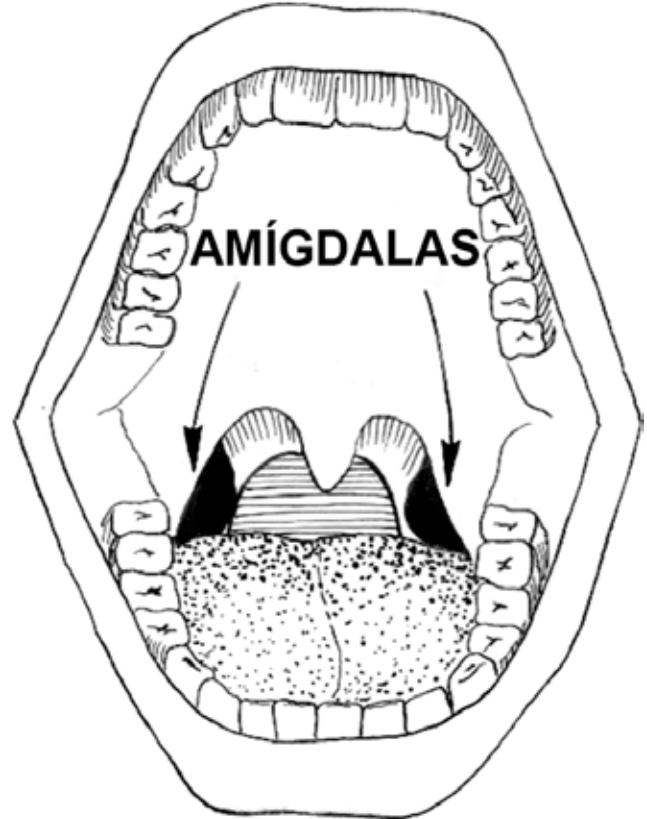

Brillient, LLC
888 E Belvidere Road, Suite 212
Grayslake, IL 60030 USA



mdi Europa GmbH
Langenhagener Straße 71
D-30855 Langenhagen, Germany



CUIDADO: Não utilizar este medicamento em crianças com menos de 10 anos de idade.

BR-LS-0001(Rev 1)2017-9_pt_PT